

EMBALLAGE

-5 litre
-10 litre



GERMACID 2% CIDEX SOLUTION

**Solution glutaraldéhyde a 2% désinfectant
haut niveau à froid prêt à l'emploi**

CARACTERISTIQUES

- Solution claire de couleur bleu.
- Solution à 2% de Glutaraldéhyde tamponnée et stabilisée.
- Prêt à l'emploi
- Sporicide complète (5 log de réduction).
- compatible avec les produits de nettoyage et de pré-désinfection
- bain actif 7 jours (Conformément à la circulaire DGS 591 du 17/12/2003).
- inactivation efficace de tous les microorganismes,
- désinfection rapide,
- excellente compatibilité avec les matériaux,
- facile à utiliser, pas d'activateur requis.

COMPOSITION

Solution de glutaraldéhyde à 2% (exprimé en matière active à 100%), avec un agent tamponnant de pH, tensioactif mouillant dispersant et d'un catalyseur hydro-alcoolique et un stabilisateur de glutaraldéhyde.

PROPRIETES

GERMACID 2% CIDEX SOLUTION est un désinfectant haut niveau à froid, prêt à l'emploi, convient parfaitement et efficacement à la désinfection des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et tous matériels et instruments résistants ou sensibles à la chaleur.

GERMACID 2% CIDEX et La combinaison équilibrée de glutaraldéhyde en synergie avec des composés auxiliaires qui favorise l'activité et l'efficacité.

GERMACID 2% CIDEX caractérisé par un large spectre d'action:

- bactéricide,
- levuricide,
- fongicide,
- tuberculocide,
- Sporicide,
- virucide contre les virus enveloppés (y compris VHB, VIH, VHC),
- virucide.

MODE D'EMPLOI

Pré-désinfection :

Nettoyage et pré-désinfection de dispositif médical avec un produit de nettoyage, Rincer abondamment avec de l'eau.

Pour le matériel endoscopique : écouvillonner et irriguer.

Désinfection :

- Verser **GERMACID 2% CIDEX** dans la cuve de trempage.
- Couvrir la cuve de trempage et laisser agir selon l'activité désirée.
- Rincer soigneusement le dispositif médical à l'eau stérile ou filtrée, pour le matériel endoscopique : rincer l'extérieur et l'intérieur.
- Bien essuyer avec un torchon à usage unique.
- Conservation maximum du bain de trempage : 14 jours (Conformément à la circulaire DGS 591 du 17/12/2003).

STOCKAGE

- Produit dangereux
 - respecter les précautions d'emploi (Etablies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations).
 - Stockage entre +5°C et +30°C.
- Dispositif médical de la classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée).

PRODUIT DISTRIBUE PAR SARAPROC MAROC

DEPOT: 2 avenue Melilia Atlas, Fès – MAROC

Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

USINE : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès

Tél : 05 35 96 04 59 Fax: 05 35 64 37 60

SITE WEB : www.saraprocmaroc.com

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

